

ライフリズムナビ + Dr. 新機能・アップデート紹介セミナー

2024年6月27日(木)14:00~14:45



専門医が考えたSaaS型高齢者見守りシステムで
介護・医療現場のお悩みを解決します。



はじめに

このセミナーは、ライフリズムナビVer2.0の画面で操作方法などをご紹介する内容となっております。

Ver1.0の方は、Ver2.0へアップデートすることで、機能をご利用いただけます。

Ver2.0へのアップデートご希望の方は、施設管理者様より弊社サポートまでご連絡ください。

ライフリズムナビ+Dr. Ver1.0

ライフリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navi Plus Doctor
produced by 東京 愛乃・病院クリニック

マイページ

ユーザーID(メールアドレス):

パスワード:

ログイン

Ver.1.1321

【推奨環境】
Windows (Windows 10以降)
Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版
Macintosh (macOS 10.12 Sierra以降)
Google Chrome 最新版
Safari 最新版
Mozilla Firefox 最新版
iOS/Android (Android 7.0以降)
Google Chrome
各OS標準ブラウザ

© 2015 Econavista Co.,Ltd.

ライフリズムナビ+Dr. Ver2.0

ライフリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navi Plus Doctor

ライフリズムナビ+Dr.にログイン

ユーザーID

パスワード

ログイン

[ログインできない方はこちら](#)

Ver.1.12.0

本日の目次

01. 開発部紹介

02. 新機能紹介の前に…

03. 新機能紹介

- ・アラート
- ・居室一覧画面
- ・居室詳細画面
- ・お助け機能
- ・7月以降のアップデートについて

04. 機能要望ヒアリング

05. 質疑応答



00. 運営からのお知らせを確認する

The screenshot shows the EcoNavista management interface. At the top, there are navigation tabs: "居室一覧" (Room List), "設定" (Settings), and "デモ機能" (Demo Function). A notification pop-up is displayed in the center, titled "お知らせ" (Notice) and "メンテナンスのお知らせ" (Maintenance Notice). The notice text reads: "2024-05-01 下記の通り、システムメンテナンスのため、本サービスをご利用頂けません。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。対象：全利用者様" (On the following dates, due to system maintenance, we cannot use this service. We apologize for the inconvenience to our customers, but we ask for your understanding. Target: All users). The background shows a grid of room status cards for "デモ50棟" (Demo 50 Building), with various rooms like "入居者501" (Resident 501) and "入居者502" (Resident 502) visible.

The screenshot shows the "お知らせ" (Notice) section of the EcoNavista management interface. A red box highlights the "アップデート情報" (Update Information) tab. Below the tab, the update content is displayed. The title is "「ベッド不在アラート」を追加 他アップデート内容" (Add "Bed Not Present Alert" and other update content). The date is "2024-05-21". The main text states: "長時間ベッドに不在の状態が続いたときにお知らせする「ベッド不在アラート」が追加されました。夜間帯など本来ベッド上にはずのご入居者がベッド上にいない状態を検知することが可能です。" (When the state of being absent from the bed for a long time continues, the "Bed Not Present Alert" has been added. It is now possible to detect the state of residents who are normally not on the bed during the night band being on the bed). Below this, the update content is listed: "【アップデート内容】 ・通知可能なアラートの種類に「ベッド不在アラート」を追加" (Update Content: Add "Bed Not Present Alert" to the types of notifications that can be sent). Other items include: "各画面で表示されるグラフをマウスオーバーすることで、グラフ上の数値を表示できる機能を追加" (Add a function to display numerical values on the graph by hovering over the graph displayed on each screen); "過去データのアラートアイコンとイベントアイコンの表示を切り替える機能を追加" (Add a function to switch the display of alert icons and event icons for past data); "イベント記録時に選択可能な項目(ヒヤリハット、投棄、事故)を追加" (Add selectable items (Near Miss, Littering, Accident) at the time of event recording); "画面上部の「サポート」をクリックして表示されるメニューに、ポータルサイトのリンクを追加" (Add a link to the portal site to the menu displayed when clicking "Support" at the top of the screen); "その他、軽微な修正" (Other minor corrections). A "詳細を見る" (View Details) link is provided at the bottom right.

01. 開発部紹介

主な開発部の業務

開発

- ・デザイン(UI/UX)の開発
見やすく・わかりやすく情報を表示する
使いやすい操作を提供する
- ・システムの開発
新しい機能を追加する
新しい情報を提供する
外部サービスと連携する
不具合の改修を行う
- ・ハードの開発
センサの精度を向上する
新しいセンサに対応する

運用保守

- ・新規導入や変更に対して、システムの更新を行う
- ・サーバが停止したり障害とならないよう、維持・管理を行う
- ・お問合せいただいた内容に対して、技術的な調査を行う

02. 新機能紹介の前に…

科学的介護推進のためには、連動する下記3要素の連携が必要



03. 新機能紹介(アラート)

(5月) ベッド不在アラートの追加

お知らせのタイミング

長時間ベッドに不在の状態が続いたときにお知らせします。

使用場面

夜間帯など本来ベッド上にはいるはずのご入居者がベッド上にいない状態を検知することが可能です。

夜中に活動する傾向がある方などにご使用ください。

読み上げ音声

「長時間ベッドに不在です」

短縮読み上げ音声

「ベッド不在」



 **ベッド不在アラート** 

見守り時間：24時間 ベッド不在時間：60分 ベッド不在が続いたときの通知：1度だけ通知 [詳しく](#)

見守り時間	<input checked="" type="radio"/> 24時間
	<input type="radio"/> 時間を指定する
ベッド不在時間	<input type="text" value="60"/> 分
	10～1440の半角整数で入力してください
ベッド不在が続いたときの通知	<input checked="" type="radio"/> 1度だけ通知
	<input type="radio"/> 不在が続けば定期的に通知


03. 新機能紹介(アラート)

(5月)ベッド不在アラートの追加

- ① 「1度だけ通知」を選択した場合は一度アラートの通知を行った後は、ベッドの在床があるまで次の通知を行いません。
「不在が続けば定期的に通知」を選択した場合は不在が続く場合でも定期的に通知を行います。

「ベッド不在時間」「アラート発報間隔」とは？

ベッド不在が続いたときの通知 1度だけ通知

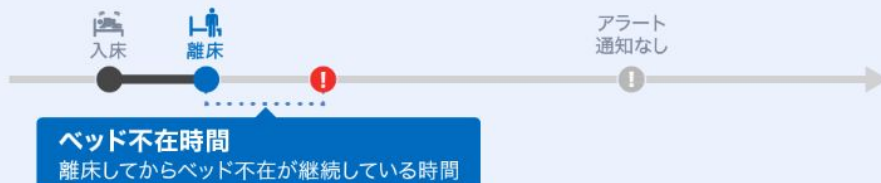

ベッド不在が続いたときの通知 不在が続けば定期的に通知



03. 新機能紹介(アラート)

(5月)ベッド不在アラートの追加

活用事例(ユーザーよりヒアリング)

- ①夜間にベッドではなく車いす上で傾眠(睡眠)される方に設定し、発報のタイミングで訪室しベッド上で臥床を促している。ベッド上での臥床時間が増えたことから、日中の傾眠が少なくなった。
- ②ベッド上で頭と足を逆にして臥床する方にベッド不在アラートを設定し、アラート発報した際に寝姿勢の確認を行っている。認知症のある方で、トイレから戻った際にズボンを脱いだ状態で逆向きに臥床するため、清潔保持にも繋がっている。
- ③夜間に職員不在のフロアで設定し入居者の所在確認として使用している。
- ④夜間に一人でトイレに行く方で、居室から出てしまい戻れなくなってしまう方に設定して、発報のタイミングで訪室し居室へ誘導している。他居室への侵入によるトラブルを予防できた。
- ⑤夜間のみ時間指定でアラートを設定、アラート発報のタイミングで訪室して、本人の居室内での行動に合わせてケアに入ることができている。
- ⑥定期的な夜間のモニター巡視を行った際に、表示が変わっていれば訪室していたが、モニター巡視タイミング以外の時間で、ベッドから長時間離れた際に気付くことができ、介入のタイミングを図ることができている。

03. 新機能紹介(居室一覧画面)

(3月)居室一覧画面のカスタマイズ表示機能を追加

ベッドから離れてからの経過時間などが見える化されることで、居室での活動履歴がより明確に確認できるようになりました。夜間の巡視などの際に、ぜひご利用ください。

アラート履歴

- デモ棟 5階 501 田中 一郎 転倒を検知しました
- デモ棟 1階 共有部 エントランス顔認証 登録者を検知しました
- デモ棟 5階 506 八坂 誠 離床しました
- デモ棟 5階 503 梶田 陽子 寝姿が悪くなっています
- デモ棟 5階 503 梶田 陽子
- デモ棟 5階 506 八坂 誠

施設メモ *4/19

【4月5日 14時 お誕生日会 実施】
お呼びする方 → 門脇様 岡山様 萩原様

【コロナ感染対象者】
金本様 4月1日まで隔離期間

デモ棟 1階

共有部 エントランス顔認証 共有部 エントランスカメラ

デモ棟 5階

501	502	503
78歳 男性 - 要介護度 自立/認知症 度 自立	78歳 男性 - 要介護度 4/認知症 度 IV	80歳 女性 - 要介護度 自立/認知症 度 自立
25℃ 63% 36.4℃ 115/72mmHg 18分 99%	25℃ 60% 37.1℃ 152/98mmHg 90%	26℃ 57% 36.1℃ 127/77mmHg 99%
活動中	活動中	トイレにいます
4月1日 13時 往診	食事量低下 (夕食増)	感染対象

デモ棟 5階

505	506
80歳 女性 - 要介護度 3/認知症 度 III a	80歳 女性 - 要介護度 1/認知症 度 自立
21℃ 50% 36.1℃ 129/79mmHg 18分 99%	23℃ 63% 36.2℃ 120/80mmHg 99%
活動中	活動中

デモ棟 6階

八十田 さと 門脇 愛子 岡山 洋子

施設メモ *5/19

【お誕生日会 実施】
お呼びする方 → 門脇様 岡山様 萩原様

【コロナ感染対象者】
金本様 隔離期間を設定

デモ棟 1階

デモ棟 5階

デモ棟 6階

601-1 八十田 さと 様

24℃ 57% 37.4℃ 133/85mmHg 99%

トイレにいます

601-2 門脇 愛子 様

26℃ 59% 36.5℃

バーチャルアシスタントに質問

03. 新機能紹介(居室一覧画面)

(3月)居室一覧画面のカスタマイズ表示機能を追加

本棟 1F

101 76歳 男性 21℃ 体動あり 0分前 19%	102 92歳 女性 20℃ 寝ています 0分前 24%	103 87歳 女性 20℃ センサに反応なし 3分前 22%	104 104歳 女性 23℃ 寝ています 3分前 21%	105 99歳 女性 ゲートウェイの電源または通信を確認ください 3分前
106 101歳 女性 19℃ 寝ています 0分前 33%	107 94歳 女性 21℃ 寝ています 0分前 23%	108 100歳 女性 20℃ 寝ています 0分前 24%	109 93歳 女性 19℃ 寝ています 3分前 26%	110 女性 27℃ 寝ています 3分前 21%
一時介護室1 21℃ センサに反応なし 0分前 20%	一時介護室2 21℃ 寝ています 3分前 24%	一時介護室3 22℃ 寝ています 3分前 23%	一時介護室4 22℃ 体動あり 0分前 21%	一時介護室5 21℃ センサに反応なし 0分前 20%

本棟 2F

226 96歳 女性 23℃ センサに反応なし 0分前 20%	227 86歳 女性 21℃ 寝ています 0分前 21%	228 100歳 女性 19℃ 寝ています 3分前 25%	229 88歳 女性 26℃ 見守り停止中 0分前 19%	230 22℃ 寝ています 0分前 19%
231 空室	232 94歳 女性 20℃ 寝ています 0分前 25%	233 98歳 女性 20℃ 寝ています 0分前 25%	234 95歳 女性 20℃ 寝ています 3分前 26%	235 84歳 男性 21℃ 寝ています 3分前 26%
236 92歳 女性 22℃ 寝ています 0分前 26%	237 99歳 女性 20℃ 体動あり 0分前 24%	238 25℃ 寝ています 0分前 18%	239 18℃ 寝ています 0分前 26%	240 74歳 女性 20℃ 寝ています 0分前 24%
241 89歳 男性 20℃ 寝ています 0分前 23%	242 81歳 男性 20℃ 活動しています 3分前 48%	243 21℃ 寝ています 0分前 22%	244 21℃ 体動あり 0分前 22%	

居室一覧画面 表示設定

居室ブロック設定

エコナ ビス太郎様

101 78歳 男性 - 要介護度:自立/認知症 度:自立

25℃ 寝ています 30分前 70%/分
63% 36.4c 115/72mmHg 99%

1行メモの表示例です。 7時間前

- 基本情報 (年齢/性別/介護度/認知症度)
- 1行メモ
- バイタル
- ステータスアイコン経過時間

全体設定

- 入居者一覧表示
なるべく多くの居室が画面に取まるように居室ブロックを縮小表示します。
- 空室表示

キャンセル 保存

03. 新機能紹介(居室一覧画面)

(3月)ステータスアイコンが表示されてからの経過時間を表示する機能が追加されました

※分単位の表示がなされます。アイコン変化後分未満の場合は「0分前」と表示されます。

※表示設定では、その他にも居室一覧画面表示のカスタマイズが可能です！

居室ブロック設定

エコナ ビス太郎様

101 78歳 男性 - 要介護度:自立/認知症
度:自立

25℃ 寝ています 70/分
63% 30分前 18/分

36.4℃ 115/72mmHg 99%

1行メモの表示例です。 7時間前

- 基本情報
(年齢/性別/介護度/認知症度)
- 1行メモ
- バイタル
- ステータスアイコン経過時間

全体設定

- 入居者一覧表示
なるべく多くの居室が画面に収まるように居室ブロックを縮小表示します。
- 空室表示

キャンセル 保存

03. 新機能紹介(居室一覧画面)

(3月)ステータスアイコンが表示されてからの経過時間を表示する機能が追加されました


活用事例(ユーザーよりヒアリング)

- ①モニター巡視の時にステータス経過時間を見て、「センサに反応なし」の時間が長いときに訪室している。
訪室のタイミングを判断できるので良い。
- ②リハビリを実施する際に、「寝ています」表示の時間が長い時には訪室を見送り、別の方のリハビリをしてから訪室している。
- ③離床した時間が一目瞭然でわかるので、事故分析をする際に活用している。
〇時から「センサに反応なし」となっているので、〇時以降の事故だった。等
- ④自身の居室が分からなくなってしまうご入居者のセンサー反応がしばらくしない場合に、施設内を探して誤入室の防止につなげている。

03. 新機能紹介(居室詳細画面)

(3月)(5月) イベント記録の拡充 (種類・内容など)

イベント記録に、「食事」「入浴」「体位変換」「更衣」「整容」「ヒヤリハット」と「投薬 精神薬」を追加しました。
また、イベントの入力時間については、30分→1分単位での入力が可能となり、同時刻に最大件まで登録することが可能となりました。
イベント入力機能の拡張により、ご入居者のアセスメントの視点が広がると考えられますので、ぜひご利用いただければ幸いです。

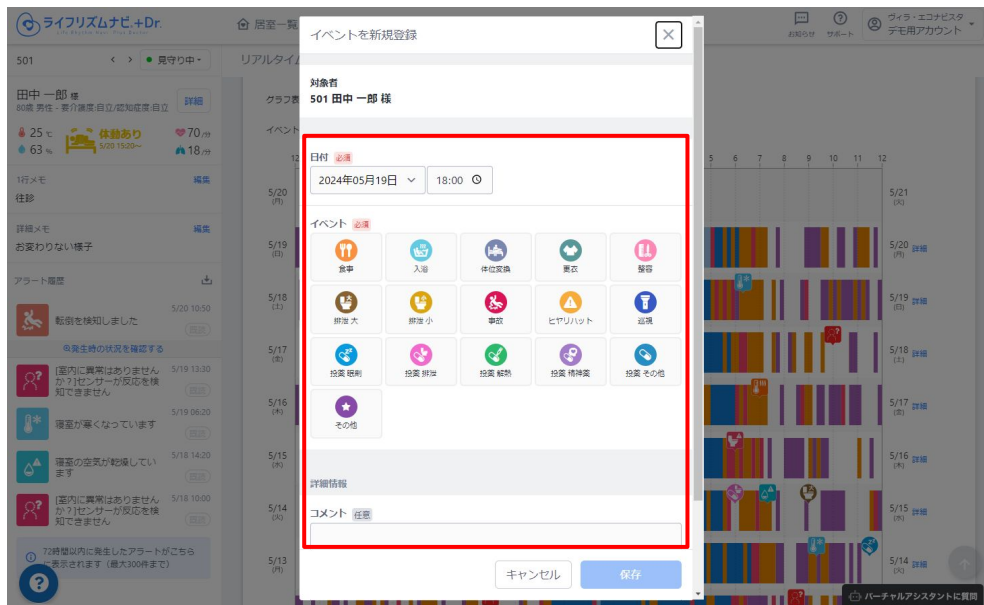

03. 新機能紹介(居室詳細画面)

(3月)(5月)イベント記録の拡充(種類・内容など)

活用事例(ユーザーよりヒアリング)

- ①入浴アイコンを使って、日中の入浴実施と睡眠時間との関係性を見るのに活用している。
- ②屯用で精神薬を服用した際に使用している。これまでは「投薬 その他」しかなかったため、一目で精神薬を服用したことがわかる。
- ③イベント登録で内容も記載できるので、振り返りの際に記録をあれこれ出さなくて済んでいる
- ④排便や排尿の量を詳細に入力することで、より詳細に睡眠との因果関係の確認や、服薬調整に活用している。

03. 新機能紹介(お助け機能)

(2月) チャットボットの追加

ライフリズムナビのマイページにお助けチャットボットが追加されました。
画面右下のアイコンを選択することで、様々なお困りに対して、チャットボットが解決します。

The screenshot displays the EcoNavista app interface. On the left, there is a sidebar with 'アラート履歴' (Alert History) and a list of alerts. The main area shows a grid of room status cards for 'デモ棟 5階' (Demo Building 5th Floor), including '501 入居者501様' (Resident 501), '502 入居者502様' (Resident 502), '505 入居者505様' (Resident 505), and '506 入居者506様' (Resident 506). Each card displays temperature, activity status, and other metrics. A red box highlights a chatbot window titled 'ライフリズムナビ チャットボット' (EcoNavista Chatbot) in the bottom right corner. The chatbot window shows a greeting message and several buttons for assistance, such as 'エラー表示が出た' (Error message appeared), '特定のアラートが鳴らなくなった' (Specific alert stopped), and 'お着取りアラートが鳴りすぎる' (Pickup alert sounds too often). At the bottom of the chatbot window, it says 'Powered by IZANAI' and has a 'チャットボットに質問' (Ask chatbot) button.

03. 新機能紹介(お助け機能)

(3月)お助けメニューの追加

ライフリズムナビのマイページにお助けメニューが追加されました。
画面左下のアイコンを選択することで、ライフリズムナビのチュートリアルなどをご利用いただけます。

The screenshot displays the EcoNaviSta+Dr. mobile application interface. At the top, the header includes the app logo and navigation icons for '居室一覧' (Room List), '設定' (Settings), and 'デモ機能' (Demo Function). The main content area is divided into several sections:

- アラート履歴 (Alert History):** A list of recent alerts with icons and timestamps, such as 'デモ棟 5階 501 入居者501様 転倒を検知しました' (4/20 10:50).
- 施設メモ (Facility Memo):** A section for notes, currently showing 'デモ棟 1階' (Demo Building 1st Floor) with sub-sections for '共有部 エントランス顔認証様' and '共有部 エントランスカメラ様'.
- デモ棟 5階 (Demo Building 5th Floor):** A grid of resident cards for rooms 501, 502, 505, and 506. Each card displays the resident's name, age, gender, care level, and various vital signs (temperature, activity, heart rate, blood pressure, oxygen saturation).
- お助けメニュー (Help Menu):** A blue overlay menu at the bottom left, highlighted with a red box. It contains four items: '画面の見方(最初に行うこと)', 'レベルに合わせた活用ガイド', '直近開催のセミナーについて', and 'チャットボットはこちら'.

03. 新機能紹介(お助け機能)

(3月)お助けメニューの追加

活用事例

- ① ある施設では新人研修に盛り込んで頂き、スタッフ間で差がでないように対応されていました。

まだまだ始まったばかりで、活用事例を収集中です。
ぜひ使い勝手などのフィードバックも併せて頂戴出来ますと幸いです。

03. 7月以降のアップデートについて

7月の新機能リリース 7/2(火) 09:30 - 11:30

8月の新機能リリース 8/27(火) 09:30 - 11:30

10月の新機能リリース 10/22(火) 09:30 - 11:30

センサデータの分析情報や、ライフリズムナビの活用情報、利用者さまのパーソナル情報などの追加を計画中！



04. 機能要望ヒアリング

機能要望ヒアリング

「こんな機能がほしい！」

「こういう画面になったらいいな」

「ここがイマイチなんだよな」

など

皆さんの声をお聞かせください！

本日はご清聴ありがとうございました。

開発・運営: エコナビスタ株式会社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟10階
TEL:050-5526-3869