

# 【超大型アップデート！】 ダッシュボード機能 & サマリー機能を使い倒す！

2024年7月23日(火)14:00~14:45



EcoNaviSta

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟10階  
TEL:050-5526-3869

 ライフリズムナビ+Dr.  
Life Rhythm Navi Plus Doctor

専門医が考えたSaaS型高齢者見守りシステムで  
介護・医療現場のお悩みを解決します。



# はじめに

このセミナーは、ライフリズムナビVer2.0の画面で操作方法などをご紹介する内容となっております。

Ver1.0の方は、Ver2.0へアップデートすることで、機能をご利用いただけます。

Ver2.0へのアップデートご希望の方は、施設管理者様より弊社サポートまでご連絡ください。

## ライフリズムナビ+Dr. Ver1.0

ライフリズムナビ+Dr.  
Life Rhythm Navi Plus Doctor  
produced by 東京 愛乃 / 株式会社 クリック

マイページ

ユーザーID(メールアドレス):

パスワード:

ログイン

Ver.1.13.21

【推奨環境】  
Windows (Windows10以降)  
Google Chrome 最新版  
Mozilla Firefox 最新版  
Macintosh (macOS 10.12 Sierra以降)  
Google Chrome 最新版  
Safari 最新版  
Mozilla Firefox 最新版  
iOS/Android (Android) 10以降  
Google Chrome  
各OS標準プラグイン

© 2015 Econavista Co.,Ltd.

## ライフリズムナビ+Dr. Ver2.0

ライフリズムナビ+Dr.  
Life Rhythm Navi Plus Doctor

ライフリズムナビ+Dr.にログイン

ユーザーID

パスワード

ログイン

[ログインできない方はこちら](#)

Ver.1.12.0

# 本セミナーの目的

---

1

新たに実装された機能を**認知する**

2

アップデートされた新機能の**基本操作を理解する**

3

知って終わりではなく**使い倒す**

# 本日の目次

01. Android/iOSアプリに端末管理メニューを追加
02. CSVデータのダウンロード機能を追加
03. イベント記録時に選択可能な項目(口腔ケア、巡視、リハビリ、レクリエーション)を追加
04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加
05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加
06. 機能要望ヒアリング
07. 質疑応答



# 00. 運営からののお知らせを確認する

The screenshot shows the EcoNavista management interface. A notification window titled "お知らせ" (Notice) is displayed, containing the following text:

**メンテナンスのお知らせ**  
2024-05-01  
下記の通り、システムメンテナンスのため、本サービスをご利用頂けません。  
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。  
対象：全利用者様

The notification window is highlighted with a red box. Below it, a grid of patient status cards is visible, including names like 田中 一郎, 安井 浩正, 梶田 陽子, 内野 正明, 八坂 誠, 八十田 さと, 門脇 愛子, and 岡山 洋子.

The screenshot shows the "お知らせ" (Notice) section of the EcoNavista management interface. The "アップデート情報" (Update Information) tab is selected and highlighted with a red box. The content includes:

**「ベッド不在アラート」を追加 他アップデート内容**  
2024-05-21  
長時間ベッドに不在の状態が続いたときにお知らせする「ベッド不在アラート」が追加されました。夜間帯など本来ベッド上にはずのご入居者がベッド上にいない状態を検知することが可能です。

**【アップデート内容】**

- ・通知可能なアラートの種類に「ベッド不在アラート」を追加
- ・各画面で表示されるグラフをマウスオーバーすることで、グラフ上の数値を表示できる機能を追加
- ・過去データのアラートアイコンとイベントアイコンの表示を切り替える機能を追加
- ・イベント記録時に選択可能な項目(ヒヤリハット、投薬、事故)を追加
- ・画面上部の「サポート」をクリックして表示されるメニューに、ポータルサイトのリンクを追加
- ・その他、軽微な修正

[詳細を見る](#)

**イベント入力の種類の追加 他アップデート内容**

# 01. Android/iOSアプリに端末管理メニューを追加

アプリ画面上部の三本線メニューの中に「端末設定」が追加されました。



アラートの音量設定などの、設定項目一覧を確認する事ができます。

「アラートの音量が小さい・鳴らない」などあった場合、「端末設定」の画面をご参照ください。

## 02. CSVデータのダウンロード機能を追加

CSVダウンロード機能が全ユーザーでご利用いただけるようになりました。

アラート履歴(施設、入居者)                      過去データ                      レポート

The image displays three screenshots of the EcoNaviSta web interface. The first screenshot, titled 'アラート履歴(施設、入居者)', shows a list of alerts with a download icon highlighted in a red box. The second screenshot, titled '過去データ', shows a bar chart of data from 2024年05月01日 to 2024年05月20日, with a '過去データCSVをダウンロード' button highlighted in a red box. The third screenshot, titled 'レポート', shows a report for May 2024 with a 'CSVをダウンロード' button highlighted in a red box.

各種データをダウンロードすることでログを参照することができます。

- ・過去1ヶ月間のアラートの発報履歴を参照したい
- ・過去のデータやレポートのデータを詳細に確認したい

など、必要な場面に応じてご利用ください。

## 02. CSVデータのダウンロード機能を追加

CSVダウンロード機能が全ユーザーでご利用いただけるようになりました。

### アラート履歴



部屋名	入居者	アラート種類	メッセージ	発生日時	確認日時
デモ50棟 5階 502	入居者502	センサー反応なし	[室内に異常はありませんか?]センサーが反応を検知できません	2024-06-18 08:00:00	未確認
デモ50棟 5階 501	入居者501	センサー反応なし	[室内に異常はありませんか?]センサーが反応を検知できません	2024-06-18 10:00:00	未確認
デモ50棟 5階 501	入居者501	湿度低下	寝室の空気が乾燥しています	2024-06-18 14:20:00	未確認
デモ50棟 5階 502	入居者502	センサー反応なし	[室内に異常はありませんか?]センサーが反応を検知できません	2024-06-18 17:00:00	未確認

### 過去データ



日時	睡眠	呼吸数	心拍数	体動継続時間	睡眠深度	無呼吸	中途覚醒	寝室	トイレ	ドア	室温	湿度
2024-05-31 21:20:00						0		反応あり	反応なし	閉	25.9	
2024-05-31 21:30:00	在床	25.9	85	33	浅い	0		反応あり	反応なし	閉	25.9	
2024-05-31 21:40:00	在床	25.9	85	33	浅い	0		反応あり	反応なし	閉	25.9	
2024-05-31 21:50:00	在床	25.9	85	33	浅い	0		反応あり	反応なし	閉	25.9	

### レポート



日付	睡眠時間	疲労回復度	快眠指数	快適環境指数	最低室温(°C)	最高室温(°C)	最低湿度(%)	最高湿度(%)
2024-06-01	7.1	74	75	80	24.3	27.5	42.4	52.3
2024-06-02	8.0	82	84	83	25.7	28.2	42.7	52.5
2024-06-03	8.0	70	72	78	24.8	28.1	43.9	52.4

### 03. イベント記録時に選択可能な項目を追加

イベント記録時に選択可能な項目を追加しました。(口腔ケア、リハビリ、レクリエーション)



イベント入力機能の拡張により、ご入居者のアセスメントの視点が広がると考えられますので、ぜひご活用ください。

### 03. イベント記録時に選択可能な項目を追加

イベント記録時に選択可能な項目を追加しました。(口腔ケア、リハビリ、レクリエーション)

<イベント入カイメージ例>



日中活動や普段の発言などを記録することで、不眠へのアプローチを検討する上で重要な指標となります。その他に、服薬・排泄・食事など生活課題に関連していると思われる情報を記録してみましょう。

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)



🏠 居室一覧 **📊 ダッシュボード** ⚙️ 設定

統計データ

施設統計

アラート



マイページにダッシュボード機能が追加され、「施設統計」と「アラート」の統計データを確認できるようになりました。

各種データを日付を絞り込んで表示する事ができます。


ダッシュボードは「契約者」「法人管理者」のアカウントでのみ閲覧が可能です。

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)

施設統計では、以下のデータを確認することができます。

### 施設統計 項目一覧

- 入居率
- 入居者数
- 新規入居者数
- 退去者数
- 空室数
- 事故件数(イベント登録)
- ヒヤリハット件数(イベント登録)
- お看取りモードの人数(ハイライト機能)
- 感染対策モードの人数(ハイライト機能)

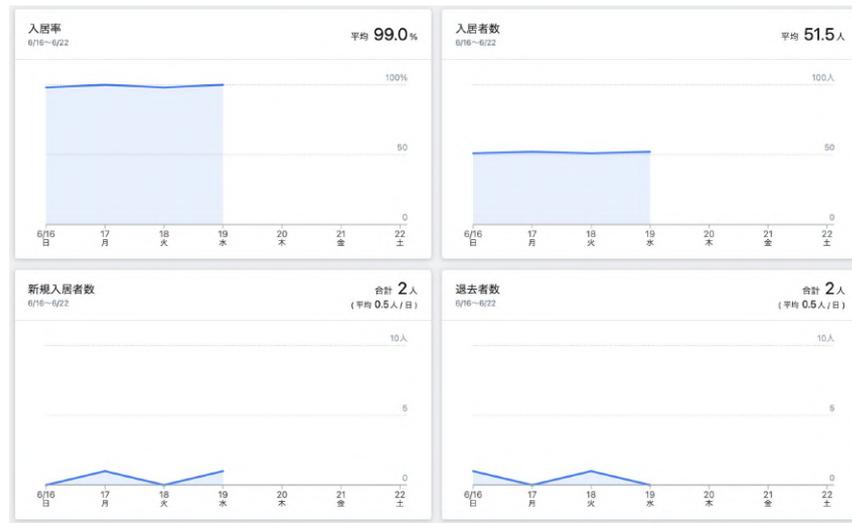

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)

入居率や入居者数などの情報は、ライフリズムナビの入居者情報が反映されます。

※介護記録ソフトとの入退去連携機能をONでご利用いただいているユーザさまは、

介護記録ソフト側で操作された入退去情報がライフリズムナビに連携されることで、統計情報に反映されます。





※毎日00:30頃に更新されます

設定

- 入居者情報
- アラート通知設定
- 介護記録連携設定
- スマホ連携設定
- ユーザー管理
- ご契約者様情報
- 規約等 & パーソナル情報
- 介護記録連携サンプル


入居者様の居室移動については [故障・トラブル相談受付フォーム](#) からご連絡ください。

部屋名	お名前	性別	ハイライト	誕生日	備考	入居日	
デモ50棟 5階							
501	ニューキョシャゴーマー入居者501	男性	お看取り: OFF 感染対策: OFF 強調表示: ON	1944年1月28日 満 80 歳	要介護度:自立、認知症 度:自立、ヘルパーがいる	2023年4月25日	編集
502	ニューキョシャゴーマー入居者502	男性	お看取り: OFF 感染対策: OFF 強調表示: OFF	1943年7月13日 満 80 歳	要支援1、認知症、ヘルパーがいる、寝たきりである、徘徊の傾向がある、持病がある	2023年4月25日	編集
503	ニューキョシャゴーマー入居者503	女性	お看取り: OFF 感染対策: ON 強調表示: OFF	1942年4月12日 満 82 歳	要介護度:自立、認知症 度:自立、ヘルパーがいる、徘徊の傾向がある	2023年4月25日	編集
505	ニューキョシャゴーマー入居者505	女性	お看取り: ON 感染対策: OFF 強調表示: OFF	1942年4月12日 満 82 歳	要介護3、認知症、ヘルパーの有無(不明)、持病がある	2023年4月25日	編集
506	ニューキョシャゴーマー入居者506	女性	お看取り: OFF 感染対策: OFF 強調表示: OFF	1942年4月12日 満 82 歳	要支援1、認知症:自立、ヘルパーがいる、寝たきりである、持病がある	2023年4月25日	編集

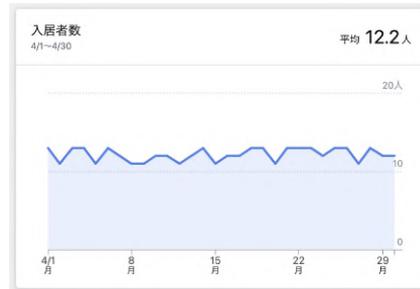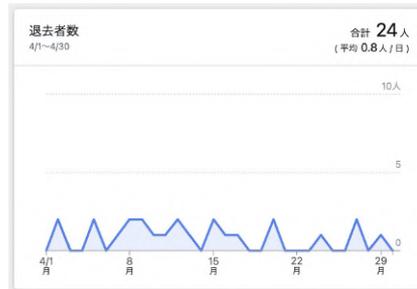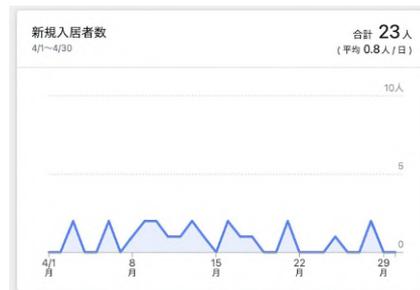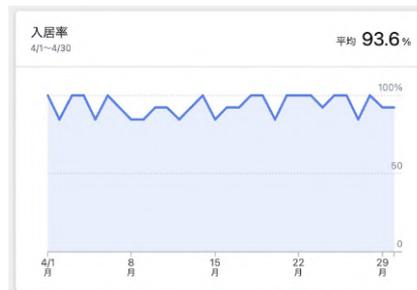

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)

事故件数・ヒヤリハット件数は、イベント登録機能の件数が反映されます。

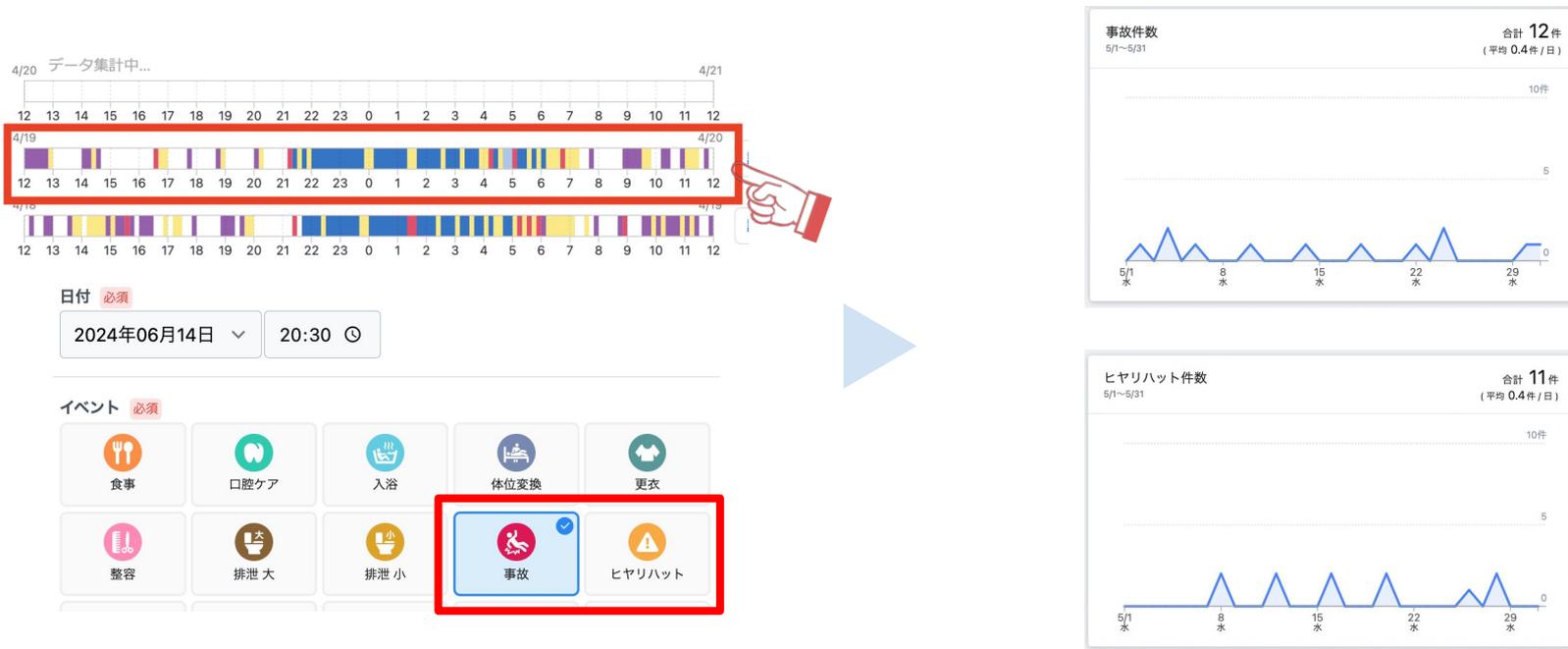

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)



お看取り・感染対策モードの人数は、ハイライト機能を設定している人数が反映されます。  
※毎日00:30頃に更新されます

ハイライト

お看取り  
お看取りをオンにすると、離床アラートのかわりにお看取りアラートを設定できるようになります。また、居室一覧ページでは緑色で強調表示されるようになります。

感染対策  
感染対策モードをオンにすると、居室一覧ページで赤色で強調表示されるようになります。

強調表示  
強調表示モードをオンにすると、居室一覧ページで居室が黄色で強調表示されるようになります。


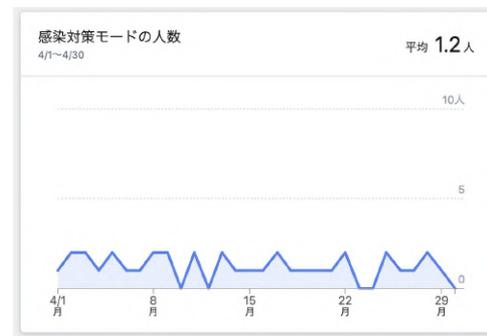
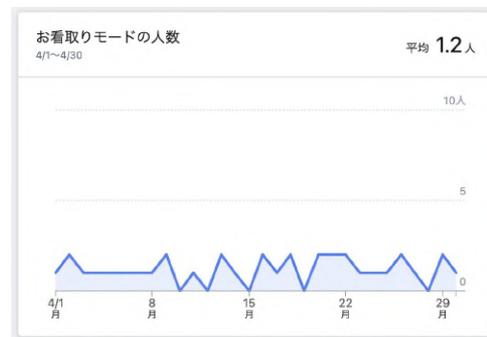


## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)

アラートの統計では、以下のデータを確認する事ができます。

### アラート統計 項目一覧

- アラート発報数
- アラート既読率
- アカウトごとの平均既読数
- 入居者ごとのアラート発報数

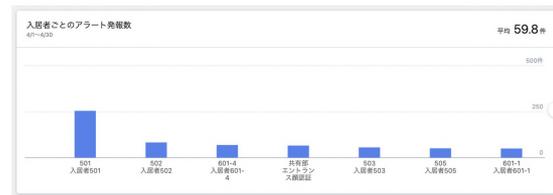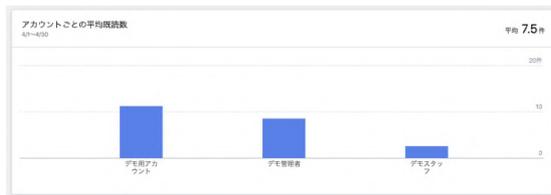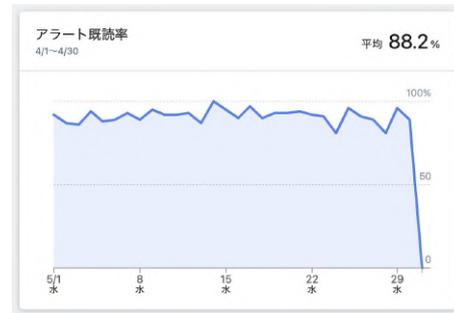

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)

アラート発報数・既読率は、施設全体のアラート数に対しての統計が表示されます。

アラート履歴

- デモ50棟 5階 501 入居者501様 転倒を検知しました
- デモ50棟 1階 共有部 エントランス顔認証 登録者を検知しました
- デモ50棟 5階 506 入居者506様 離床しました
- デモ50棟 5階 503 入居者503様 寝室が暑くなっています
- デモ50棟 5階 503 入居者503様 [室内に異常はありませんか?]センサーが反応を検知できません
- デモ50棟 5階 506 入居者506様 [室内に異常はありませんか?]センサーが反応を検知できません

24時間以内に発生したアラートがこちらに表示されます (最大300件まで)

施設メモ ●6/19



【お誕生日会 実施】  
お呼びする方 → 入居者601-2様 入居者601-3様 入居者602-2様

【コロナ感染対象者】  
入居者602-2様 隔離期間を設定

デモ50棟 1階  
デモ50棟 5階

501 入居者501様 25℃ 63% 36.4℃ 115/72mm 99%	502 入居者502様 25℃ 60% 37.1℃ 152/98mm 90%	503 入居者503様 26℃ 57% 31
601-1 入居者601-1様 24℃ 57% 37.4℃ 133/85mm 99%	601-2 入居者601-2様 26℃ 59% 36.5℃ 137/92mm 99%	601-3 入居者601-3様 25℃ 61% 31
603 入居者603様 25℃ 63% 36.4℃ 115/72mm 99%	604 入居者604様 25℃ 60%	605 入居者605様 25℃ 60%

デモ50棟 7階

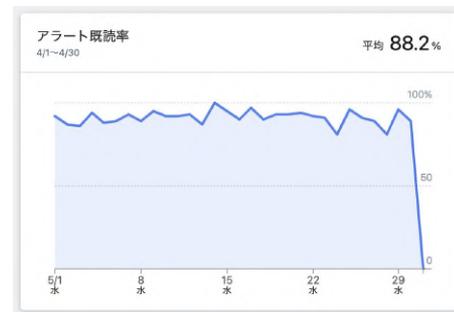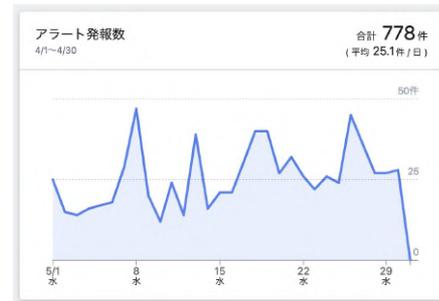

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)


アカウントごとの平均既読数は、登録ユーザーアカウントに対しての数が表示されます。

### ユーザー管理

この施設（ヴィラ・50ビスタ）に紐付けられたユーザーを管理します。  
新規ユーザー登録や、ユーザーの閲覧・編集権限の設定を行います。

ユーザーID (メールアドレス)	ユーザー名	権限	
o.com	デモ用アカウント	契約者	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
o.com	デモ管理者	法人管理者	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
o.com	デモスタッフ	閲覧者	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>

[新規ユーザー登録](#)

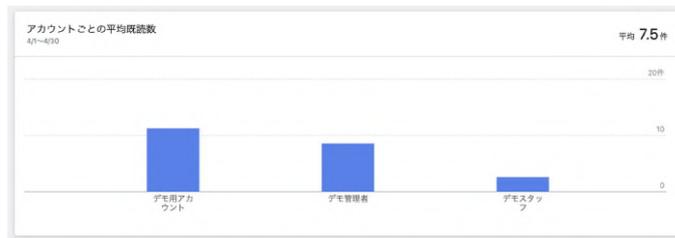


アカウントごとのアラート既読数を1日あたりに換算した件数が表示されます。

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者のみ)

入居者ごとのアラート発報数は、アラート発報数が多いご入居者順に表示されます。

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left titled 'アラート履歴' (Alert History) and a main content area. The sidebar lists several alerts with icons and timestamps, such as 'デモ50棟 5階 501 入居者501様 転倒を検知しました' (6/20 10:50) and 'デモ50棟 5階 506 入居者506様 離床しました' (6/20 10:30). A red box highlights the sidebar. The main content area shows '施設メモ' (Facility Memo) with messages like '【お誕生日会 実施】' and '【コロナ感染対象者】'. Below this is a grid of resident cards for 'デモ50棟 1階' and 'デモ50棟 5階', displaying metrics like temperature, activity status, and health indicators. A blue arrow points from the sidebar area towards the right.

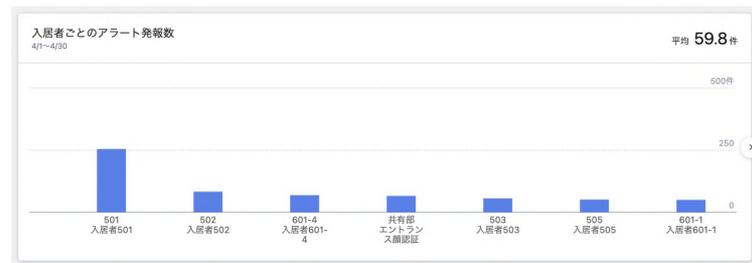

## 04. 各種統計情報を表示するダッシュボード機能を追加 (※契約者、法人管理者ユーザのみ)

ダッシュボード機能の想定活用シーン

### アラート発報数が多いご入居者の設定を見直し

アラート通知の件数が多いご入居者の場合、適切な設定秒数になっていなかったり、不要なアラートを設定している事が考えられます。

### 施設全体のアラート発報件数を減らす

アラートの発報件数が多い場合、業務の負担感につながったり、必要な通知を聞き逃してしまう可能性があります。施設全体の発報件数を参照して、鳴りすぎていないかを確認をしてみましょう。

### アラートを確認し既読にしているか確認

アラートを未読状態にしていると、居室一覧画面ではリアルタイムのアイコンが隠れてしまいます。「通知が鳴ったら、対応を行い既読にする」という一連の操作が行われているか見直しをしましょう。

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

居室画面に平均睡眠時間や平均就寝時間などのサマリー機能が追加されました。

サマリー

	2024年6月9日 - 6月15日	2024年6月16日 - 6月19日	
平均睡眠時間	7時間 37分	7時間 33分	-4分
平均就寝時間	23時 0分	17時 21分	
平均起床時間	6時 38分	23時 5分	
深い睡眠の割合	52.5%	53%	+0.5%
平均中途覚醒回数	0.9回	1.5回	+0.6回
平均無呼吸回数	1.1回	1回	-0.1回
平均疲労回復度	86点	84.5点	-1.5点
平均快眠指数	86点	94.5点	+8.5点
平均快適環境指数	80.7点	84点	+3.3点

期間を選択することで、平均の睡眠時間などを比較する事ができます。  
就寝時間と起床時間は、概ね翌々日の15時、それ以外のデータは翌日の15時に集計されます。

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

サマリー機能では、以下のデータを確認することができます。

	2024年5月12日 - 5月18日	2024年5月19日 - 5月19日	
z <sup>2</sup> 平均睡眠時間	7時間 46分	7時間 18分	-28分
🌙 平均就寝時間	23時 2分	集計中	
🌅 平均起床時間	6時 48分	集計中	
🛌 深い睡眠の割合	51.5%	54.8%	+3.3%
🕒 平均中途覚醒回数	1回	0回	-1回
👂 平均無呼吸回数	1.3回	2回	+0.7回
🧑 平均疲労回復度	85.7点	71点	-14.7点
z <sup>2</sup> 平均快眠指数	88.3点	95点	+6.7点
🏠 平均快適環境指数	81.7点	96点	+14.3点

※就寝時間と起床時間は翌日の15時、それ以外のデータは翌日の15時に集計されます

開始 2024年6月9日 終了 2024年6月15日

今週

先週

先々週

3週間前

4週間前

今月

先月

先々月

キャンセル 適用


先々月～今週で選択したい期間をクリックして絞り込みが可能です。

(例えば、3週間前と今週のサマリー情報との比較や、先月と昨日のサマリー情報との比較等が可能です。)

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

サマリー機能では、以下のデータを確認する事ができます。


**平均睡眠時間**： 前日12:00-当日12:00を1日として、平均の睡眠時間を表示します。

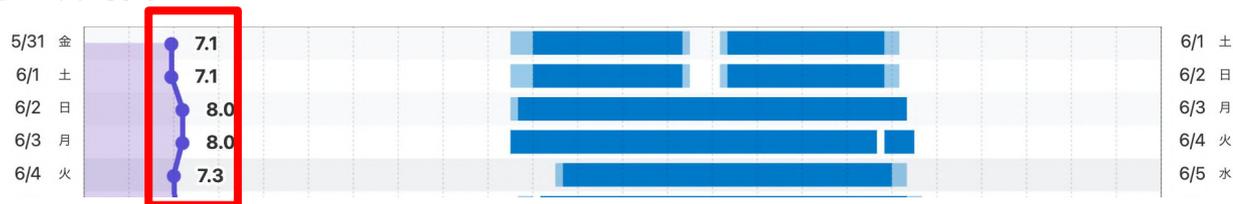

**平均就寝時間**： 就寝した時刻の平均を表示します。




**平均起床時間**： 起床した時刻の平均を表示します。

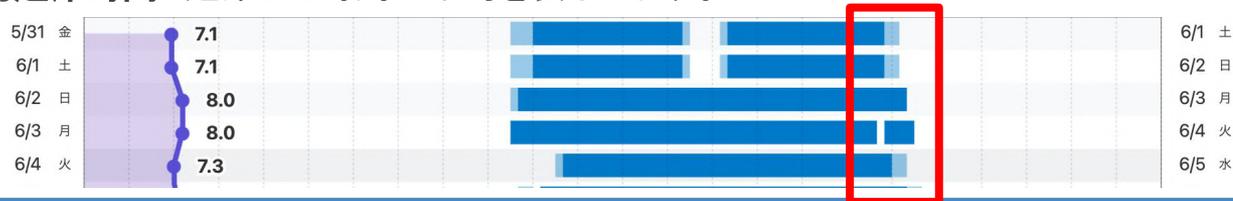

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

サマリー機能では、以下のデータを確認する事ができます。


**深い睡眠の割合：**睡眠時間うち、睡眠深度が深い時間の割合を表示します。

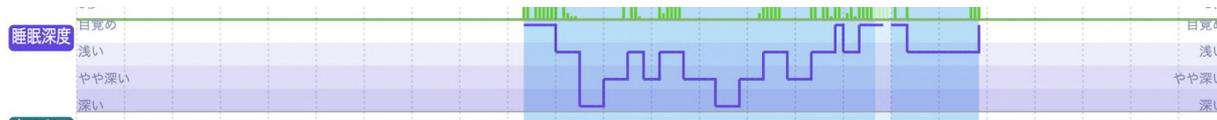

**平均中途覚醒回数：**表示期間の中途覚醒回数を1日あたりに換算した回数を表示します。



**平均無呼吸回数：**表示期間の無呼吸回数を1日あたりに換算した回数を表示します。

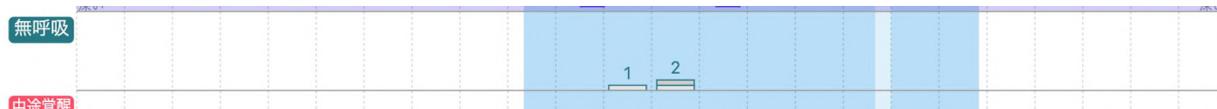

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

サマリー機能では、以下のデータを確認することができます。

**平均疲労回復度:** ライフリズムスコアの疲労回復度の平均点を表示します。



**平均快眠指数:** ライフリズムスコアの快眠指数の平均点を表示します。



**平均快適環境指数:** ライフリズムスコアの快適環境指数の平均点を表示します。



## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

サマリー機能を活用することで、複数の画面で参照していた各種情報をまとめて比較ができます。



※就寝時間と起床時間は翌々日の15時、それ以外のデータは翌日の15時に集計されます

ご入居者の過去データとの比較が気軽にできるようになり、アセスメントの視点が広がると考えられますので、ぜひご活用ください。


## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

### これまでに寄せられたライフリズムナビユーザー様からのお声

- ・個人データの変化の傾向を知りたい。
- ・平均睡眠時間が見えると便利。  
例: 19時に寝て4時に起きる方がいる。  
その方にとっての適正睡眠時間が可視化できると、日中の活動時間を増やすなど寄り添ったケアができる。
- ・先日、夜間不眠のご利用者様のデータを医療職へ共有する機会があり、一日ごとのデータを提供していた。  
キャプチャで一日ごとにしか保存ができない為、複数日のデータを比較しにくく、一週間程のまとまった情報を表示出来ると睡眠の傾向を分析しやすい。
- ・グラフ情報の数値化(日ごとのトイレの回数)や睡眠の特徴のピックアップをライフリズムナビとは別で統計を取っている。  
例えば、それぞれの平均値を月ごとに比較し、中途覚醒については7、8月は少ない傾向であると気づききっかけになった、など。  
平均値などがライフリズムナビ上で見れると良い。
- ・入居者の夜間の行動、睡眠の傾向を調べているが、日々のデータはあるものの、睡眠時間の月間平均であるとトイレを何時に使用しているかなどの統計を取るためのソフトがなく、データを手入力しエクセルで再計算している。  
データから平均や分布を調べられる機能はないか？今後追加されることはないか？  
平均睡眠時間、夜間のトイレの使用時間の分布(何時頃、トイレに立つことが多いのかなど)、  
離入床の時間の分布等(何時に入床し、何時に離床することが多いのか)など。
- ・過去データ、睡眠ログなど〇月と〇月の比較表示がボタンなどで操作して画面表示できるとよい。
- ・期間集計をして、ビフォーとアフターが見えるとよい。

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

これまでのデータ比較方法

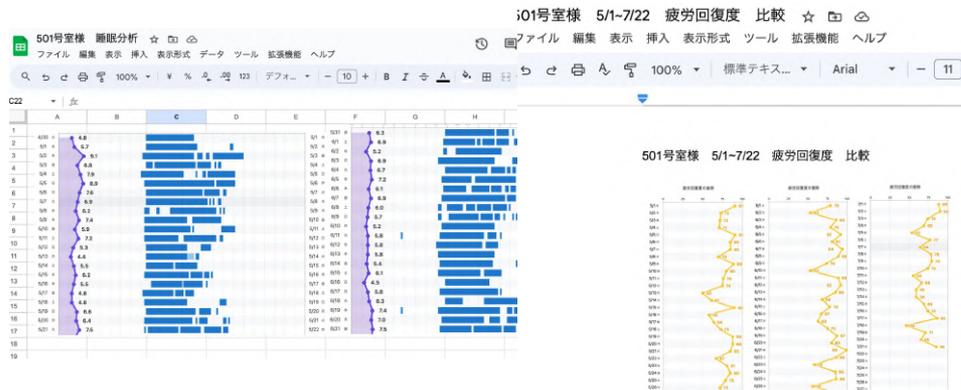

データをExcelやWordに添付して画像を比較  
紙に印刷して比較 など

分析をするのに一苦労・・・

サマリー機能でのデータ比較方法

	2024年5月12日 - 5月18日	2024年5月19日 - 5月19日	
平均睡眠時間	7時間 46分	7時間 18分	-28分
平均就寝時間	23時 2分	集計中	
平均起床時間	6時 48分	集計中	
深い睡眠の割合	51.5%	54.8%	+3.3%
平均中途覚醒回数	1回	0回	-1回
平均無呼吸回数	1.3回	2回	+0.7回
平均疲労回復度	85.7点	71点	-14.7点
平均快眠指数	88.3点	95点	+6.7点
平均快適環境指数	81.7点	96点	+14.3点

日付を選択するだけで簡単に比較が可能に！

アカウント権限による操作制限も無く、閲覧者権限でログインしている端末でも操作できます。

## 05. 居室画面に入居者の統計情報を表示するサマリー機能を追加

サマリー機能の想定活用シーン

### 睡眠薬調整前後、睡眠の変化の確認

夜間不眠傾向にある方に対して、服薬調整を実施した際に、薬を処方される前と後の睡眠の変化を比較することで、薬が効果的であったか？など振り返りにご活用いただけます。

### レクリエーション・リハビリ開始前と後の比較

日中活動の促しを行ったことで、夜間の睡眠に改善が見られたかの振り返りにご活用頂けます。

サマリー

	アプローチ前 2024年6月30日 - 7月6日	アプローチ後 2024年7月21日 - 7月27日	変化はあったか？
平均睡眠時間	5時間 28分	8時間 19分	+2時間51分
平均就寝時間	20時 31分	20時 41分	
※ 平均起床時間	3時 33分	4時 7分	
深い睡眠の割合	67.7%	77%	+9.3%
平均中途覚醒回数	0.5回	1回	+0.5回
平均深呼吸回数	0回	0回	-
平均疲労回復度	75.2点	85点	+9.8点
平均快眠指数	73点	94点	+21点
平均快適寝指数	82.5点	89点	+6.5点

比較をすることで、睡眠時間や中途覚醒の回数、スコアの増減などに注目してみましょう。

数値に変化が見られない場合には、ライフリズムナビのデータを医療職へ連携し、別のアプローチ方法を検討しましょう。

## 06. 機能要望ヒアリング

### 機能要望ヒアリング

今回ご紹介させていただいた新機能はいかがでしたでしょうか？

「新たにこんな機能がほしい！」

「こういう画面になったらいいな」

「使っていて不便なところがある」

など

皆さんの声をお聞かせください！

## 07. 質疑応答



質問がある方は  
お気軽にどうぞ！



本日はご清聴ありがとうございました。

開発・運営: エコナビスタ株式会社

〒261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟10階

TEL:050-5526-3869