

ライフリズムナビ + Dr. 新機能解説セミナー

2024年10月24日(木)14:00~14:45



専門医が考えたSaaS型高齢者見守りシステムで
介護・医療現場のお悩みを解決します。



はじめに

このセミナーは、ライフリズムナビVer2.0の画面で操作方法などをご紹介する内容となっております。

Ver1.0の方は、Ver2.0へアップデートすることで、機能をご利用いただけます。

Ver2.0へのアップデートご希望の方は、施設管理者様より弊社サポートまでご連絡ください。

ライフリズムナビ+Dr. Ver1.0

ライフリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navi Plus Doctor
produced by 東京 愛乃・梅原クリニック

マイページ

ユーザーID(メールアドレス):

パスワード:

ログイン

Ver.1.13.21

【推奨環境】
Windows (Windows10以降)
Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版
Macintosh (macOS 10.12 Sierra以降)
Google Chrome 最新版
Safari 最新版
Mozilla Firefox 最新版
iOS/Android (Android) 以降
Google Chrome
各OS標準プラグイン

© 2015 Econavista Co., Ltd.

ライフリズムナビ+Dr. Ver2.0

ライフリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navi Plus Doctor

ライフリズムナビ+Dr.にログイン

ユーザーID

パスワード

ログイン

[ログインできない方はこちら](#)

Ver.1.12.0

本セミナーの目的

1

新たに実装された**機能を知る**

2

アップデートされた新機能の**操作方法を理解する**

3

知って終わりではなく**業務の中で使ってみる**

本日の目次

01. 居室一覧画面に「直近24時間」のデータ表示機能を追加
02. 空室の居室詳細画面へのアクセスを可能にする対応
03. ベッド活動アラート設定に、AI分析によるおすすめ設定時間表示を追加
04. アラート通知設定画面の改善
05. アラート音声を入居者名で読み上げる機能の追加
06. 居室詳細画面に現在の時刻でイベントを登録できるボタンを追加
07. バーチャルアシスタント機能のスマホ対応
08. 質疑応答



00. 運営からののお知らせを確認する

The screenshot shows the EcoNavista management interface. A notification titled "メンテナンスのお知らせ" (Maintenance Notice) is displayed, dated 2024-05-01. The notification text states: "下記の通り、システムメンテナンスのため、本サービスをご利用頂けません。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。対象：全利用者様" (As follows, due to system maintenance, we cannot use this service. We apologize for the inconvenience to our customers, but we ask for your understanding. Target: All users). The notification is highlighted with a red box. Below the notification, a grid of room status cards is visible, including room 501 (田中 一郎), room 502 (安井 浩正), room 503 (梶田 陽子), room 505 (内野 正明), room 506 (八坂 誠), room 601-1 (八十田 さと), and room 601-2 (門脇 愛子). Each card shows room temperature, activity status, and other metrics.

The screenshot shows the "アップデート情報" (Update Information) section of the EcoNavista management interface. The section title is "「ベッド不在アラート」を追加 他アップデート内容" (Add "Bed Not Present Alert" and other update content). The update date is 2024-05-21. The main text states: "長時間ベッドに不在の状態が続いたときにお知らせする「ベッド不在アラート」が追加されました。夜間帯など本来ベッド上にはずのご入居者がベッド上にいない状態を検知することが可能です。" (When the state of being absent from the bed for a long time continues, the "Bed Not Present Alert" is added. It is possible to detect the state of guests who are normally not in the bed at night being absent from the bed). Below this, the "【アップデート内容】" (Update Content) section lists the following changes:

- ・通知可能なアラートの種類に「ベッド不在アラート」を追加
- ・各画面で表示されるグラフをマウスオーバーすることで、グラフ上の数値を表示できる機能を追加
- ・過去データのアラートアイコンとイベントアイコンの表示を切り替える機能を追加
- ・イベント記録時に選択可能な項目(ヒヤリハット、投棄、事故)を追加
- ・画面上部の「サポート」をクリックして表示されるメニューに、ポータルサイトのリンクを追加
- ・その他、軽微な修正

A "詳細を見る" (View Details) link is provided. At the bottom, the section title "イベント入力の種類の追加 他アップデート内容" (Add event input types and other update content) is visible.


01. 居室一覧画面に「直近24時間」のデータ表示機能を追加

居室一覧に「直近24時間」ボタンが実装されました。

The screenshot shows the EcoNavista web interface. At the top, there's a navigation bar with '居室一覧' (Room List), 'ダッシュボード' (Dashboard), and '設定' (Settings). A red box highlights the '直近24時間' (Last 24 Hours) button. Below the navigation bar, there's a sidebar with 'アラート履歴' (Alert History) and a main content area. The main content area shows a detailed view for 'デモ棟 1階' (Demo Building 1st Floor). It includes a '施設メモ' (Facility Memo) section with text about birthday parties and COVID-19 measures. Below that, there's a 'グラフ表示' (Graph Display) section with checkboxes for 'ベッド' (Bed), '喫室' (Dining Room), 'トイレ' (Toilet), and 'データエラー' (Data Error). The main part of the page is a timeline showing activities for '入居者501様' (Resident 501) and '入居者502様' (Resident 502) over a 24-hour period. The timeline is divided into sections for '共有部' (Common Area) and 'デモ棟 5階' (Demo Building 5th Floor). The '入居者501様' section shows a timeline of activities with colored bars representing different events. The '入居者502様' section shows a similar timeline. At the bottom right, there's a button for 'バーチャルアシスタントに質問' (Ask Virtual Assistant).

01. 居室一覧画面に「直近24時間」のデータ表示機能を追加

「直近24時間」を選択すると、施設内の全居室について、現在時刻から直近24時間のグラフ形式で確認できます。

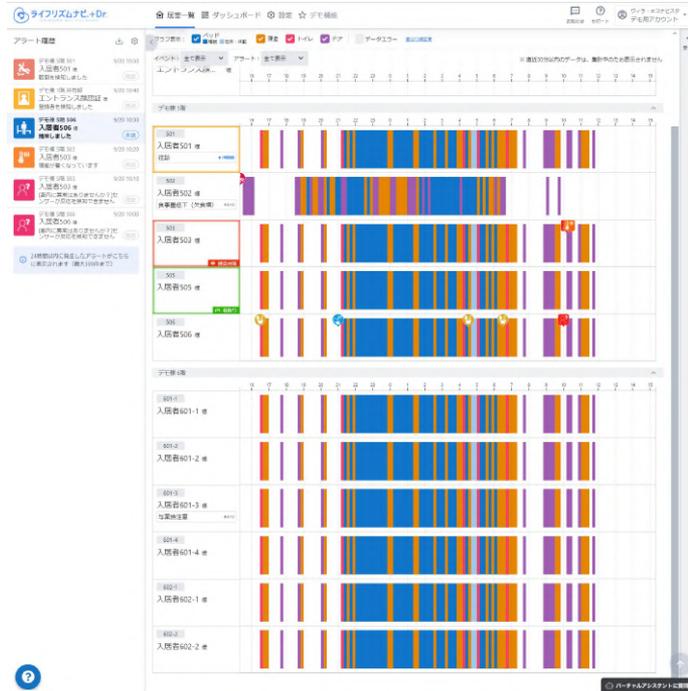

活用例:


- ・「出勤時」や「朝の申し送り」の際に夜間の睡眠状況を確認。
→眠れていない方は「注意事項」を申し送る。
- ・夜間帯の入居者が離床するタイミングの傾向を見て、スタッフの休憩時間を決める。

ユーザーの声:

- ・毎朝の申し送りの時に一人ずつ「リアルタイムデータ」を確認していたが、一括でデータを見られるようになった。

02. 空室の居室詳細画面へのアクセスを可能にする対応

空室でも居室詳細画面へのアクセスや入居者情報の編集が可能になりました。
居室利用前にセンサーの反応をアイコンで確認することができます。

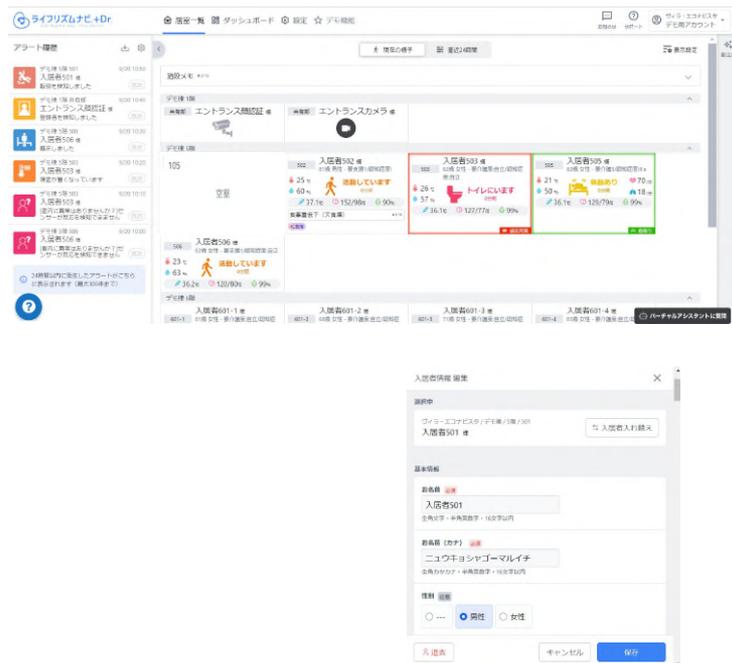

02. 空室の居室詳細画面へのアクセスを可能にする対応

居室利用前にセンサーの反応をアイコンで確認することができます。



活用例:

・新規入居前や退院前の居室準備の際にセンサーの稼働テストを実施。

チェック項目:

- ◇ゲートウェイエラーになってないか?
- ◇各センサーの反応に不具合はないか?

03. ベッド活動アラート設定に、AI分析によるおすすめ設定時間表示を追加

こんなことはありませんか？



ベッド活動アラート

見守り時間：24時間 活動継続時間：10秒 通知するタイミング：睡眠中のみ通知 [編集](#)



「活動継続時間を何秒に設定すればいい？」



「なんだか通知が鳴りすぎている…」

「通知が来ない時があるけど
何秒で設定したらいいのか…」

03. ベッド活動アラート設定に、AI分析によるおすすめ設定時間表示を追加

ベッド活動アラート設定画面で「睡眠中のみ通知」を選択すると、AI分析によるおすすめ設定秒数が表示されるようになりました。

ベッド活動アラート
見守り時間：24時間 活動継続時間：10秒 通知するタイミング：睡眠中のみ通知 [閉じる](#)

見守り時間
 24時間 時間を指定する

活動継続時間
10 秒
1~30の半角整数で入力してください
AIによる分析 おすすめの設定時間は9秒です。

「睡眠中のみ通知」の場合、AIの分析によるおすすめ設定時間が確認できます。
おすすめ設定時間を表示するには7日間以上の睡眠データが必要です。



通知するタイミング
 在床中は常に通知 睡眠中のみ通知（従来の設定）

このスクリーンショットは、システム全体のダッシュボードを示しています。中央には、ユーザーID、部屋番号、および活動状態（起きている、寝ている）に関する詳細なデータテーブルが表示されています。左側にはナビゲーションメニューがあり、右側にはアラート設定の概要が示されています。

このスクリーンショットは「アラート通知設定編集」画面を示しています。ここでは、特定の部屋（501 入居者501）に対してアラートを設定できます。画面には「居室選択」「アラート設定」「確認」のステップがあり、現在「アラート設定」の段階にいます。下部には「離床アラート」と「ベッド活動アラート」の設定項目があり、両方ともONになっています。この画面では「ベッド活動アラート」の「活動継続時間」が10秒と設定されており、AI分析によるおすすめ設定時間（9秒）も表示されています。

03. ベッド活動アラート設定に、AI分析によるおすすめ設定時間表示を追加

設定時の注意

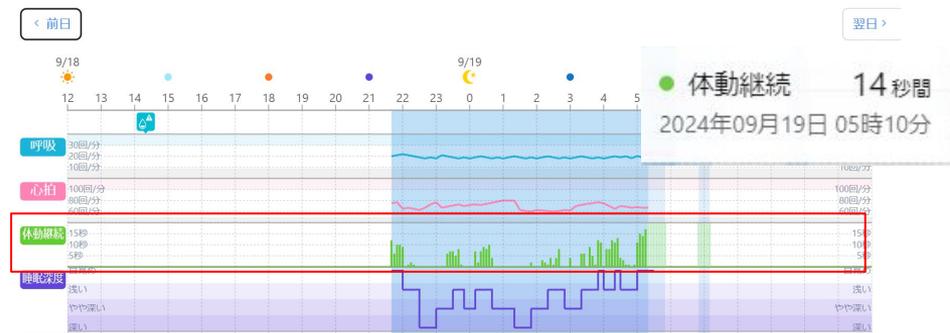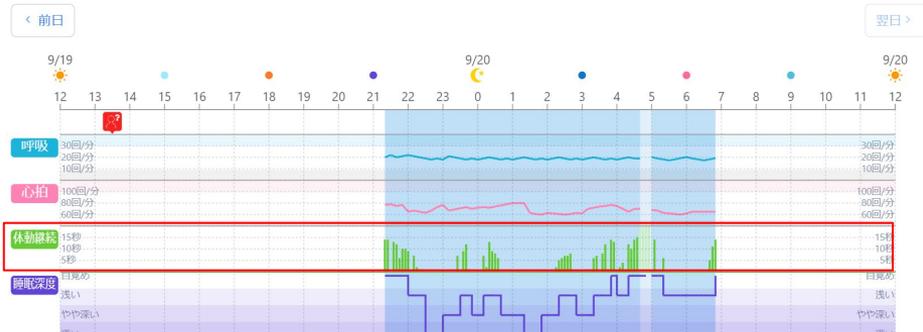

AI分析のおすすめ設定時間を参考にしつつ、実際の詳細データを見ながら秒数設定の微調整をしましょう。

03. ベッド活動アラート設定に、AI分析によるおすすめ設定時間表示を追加

設定に迷ったときは

 ベッド活動アラート
見守り時間: 18:00~6:30 活動継続時間: 30秒 通知するタイミング: 在床中は常に通知 [詳しく](#)

見守り時間

24時間 時間を指定する
18:00 ~ 06:30

活動継続時間

30 秒

1~30の半角整数で入力してください



「睡眠中のみ通知」の場合、AIの分析によるおすすめ設定時間が確認できます。
おすすめ設定時間を表示するには7日間以上の睡眠データが必要です。

通知するタイミング

在床中は常に通知 睡眠中のみ通知 (従来の設定)


通知するタイミングを選択できるようになりました。
新たに追加された「在床中は常に通知」は、睡眠時以外でも体動をお知らせします。

在床中は常に通知

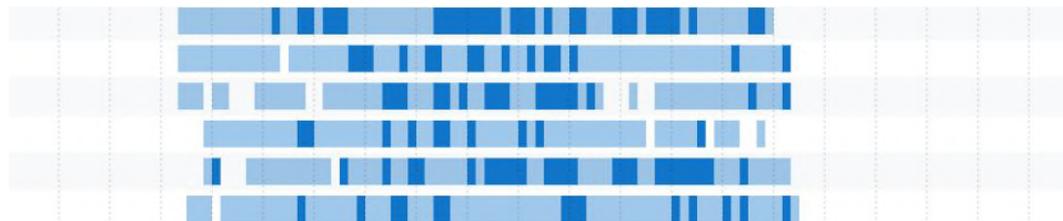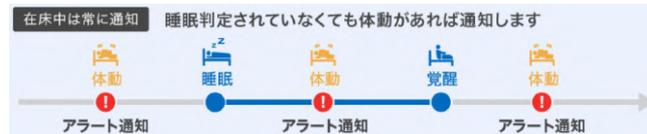

臥床後に体動が多く睡眠状態にならない方

睡眠中のみ通知 (従来の設定)

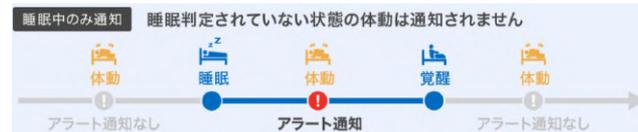

臥床後にすぐに睡眠状態になる方

04. アラート通知設定画面の改善

複数部屋選択時のアラート設定方法が一部変更されました。複数部屋選択時は、編集するアラートを1つだけ選択し、選択したアラートのみについて変更を反映するようになりました。

全居室選択	離床	ベッド活動	ベッド不在	動き出し	活動継続	トイレ	長時間トイレ	ドア	高温	低温	室温低下	センサー反応なし
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

アラート通知設定編集

適用するアラートを選択

選択したご入室に適用するアラートを1つ選択してください。
選択したアラート以外の設定は変更されません。

- 離床アラート
- ベッド活動アラート
- ベッド不在アラート
- 動き出しアラート
- 活動継続アラート

キャンセル

複数の居室を選択した場合、一度に設定できるアラート種別は一種類だけです。

04. アラート通知設定画面の改善

アラート通知設定編集 ×

居室選択 アラート選択 詳細設定 確認

選択中の居室 ✓ 5件 選択済み

501	入居者501
502	入居者502
503	入居者503

[全て見る](#)

アラート設定

離床アラート
見守り時間：24時間 ベッド滞在時間：3分 [編集](#)

変更前(従来)

- ・複数部屋選択
- ・複数のアラート設定が可能



変更後(現在)



- ・複数部屋選択
- ・1種類のアラート設定が可能



複数の居室を選択した場合は、選択したすべての居室において一括で設定が変更されます。

05. アラート音声を入居者名で読み上げる機能の追加

アラート設定画面に「読み上げ設定」機能が追加され、居室毎にアラート読み上げの内容を選択できるようになりました。

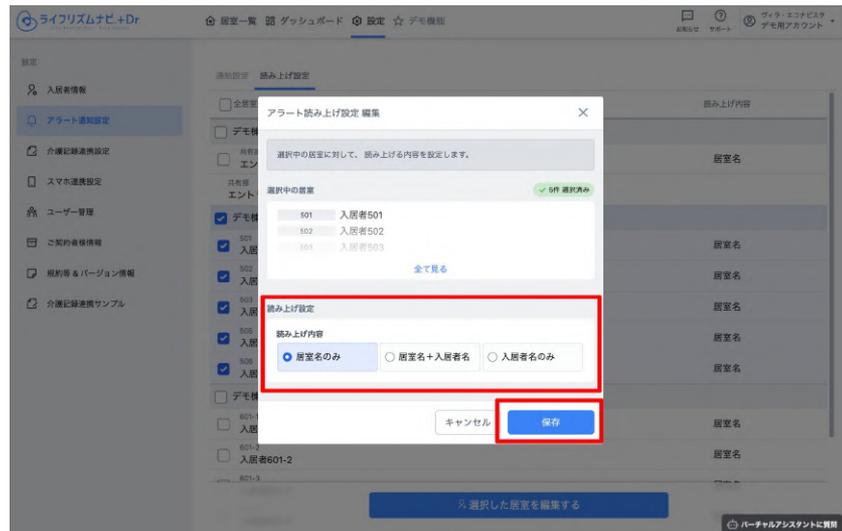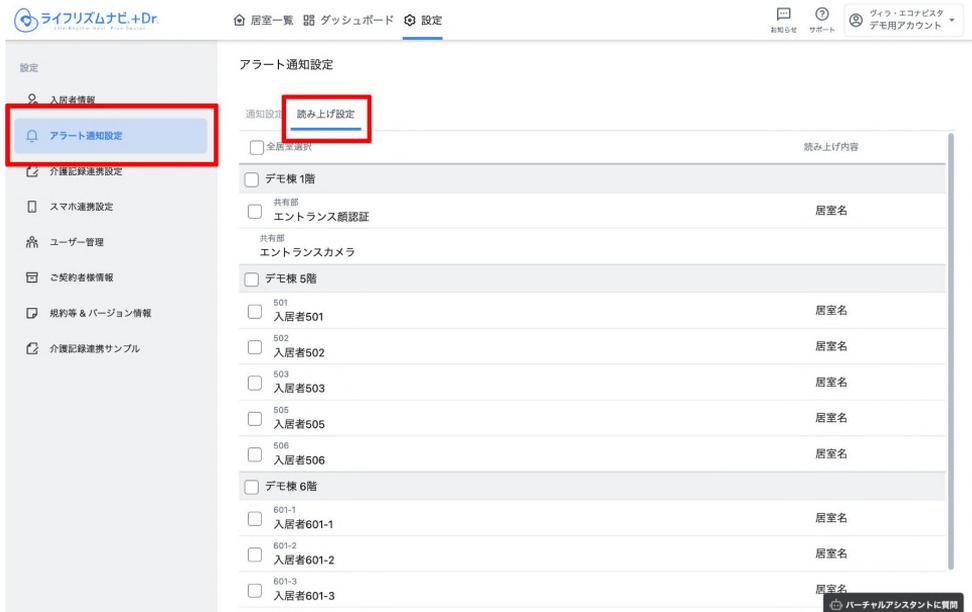

- 居室名のみ
- 居室名+入居者名
- 入居者名のみ

の3種類から選択可能です。

05. アラート音声を入居者名で読み上げる機能の追加

「入居者名」は、入居者情報の[お名前(カナ)]に入力された内容を読み上げます。

入居者情報 編集

入居者さまの基本情報を編集します。
* 介護記録との入退去連携がONになっている場合は、ライフリズムナビの設定画面で入居/退去処理を行っても、介護記録システムの入居/退去情報が優先され上書きされます。

選択中
ヴィラ・エコナビスタ / デモ棟 / 5階 / 501
入居者501 様

基本情報

お名前 必須
入居者501
全角文字・半角英数字・16文字以内

お名前(カナ) 必須
ニユキョシャゴーマルイチ
全角カタカナ・半角英数字・16文字以内

性別 任意
 --- 男性 女性

生年月日 任意
1944 年 1 月 28 日

戻る キャンセル 保存

活用例:

- ・スマホ画面を見なくても、誰の通知か知りたい時に。
- ・夜勤の休憩回しで一時的に、他のフロアからヘルプに入る際にも、居室番号やご入居者の名前を覚えなくても読み上げがあれば安心できる。

iOSアプリをご使用の場合は、以下の点にご注意ください。



この機能は、iOSアプリのバージョン 2.4.0以降へのアップデートが必要です。
アップデートをしていない場合、マイページで設定を変更しても「居室名のみ」を読み上げます。



[お名前(カナ)]の変更や入退去など、入居者情報に変更があった場合はアプリの再起動を行うことで変更内容が反映されます。



読み上げ内容が長くなると、途中でしか読み上げられない場合があります。
7~8秒程度で読み上げが途切れますので「居室名 + 入居者名」に設定する場合はご注意ください。

06. 居室詳細画面に現在の時刻でイベントを登録できるボタンを追加

居室詳細画面の右下に「+」ボタンが追加され、現在の時刻でイベント登録ができるようになりました。

The screenshot displays the EcoNavista app interface for a room (501). The main screen shows various data points and charts. A red box highlights a blue '+' button in the bottom right corner of the main screen, indicating where to click to add an event.

The modal window titled "イベントを新規登録" (Register New Event) is open, showing the following details:

- 対象者 (Target): 501 入居者501 様
- 付 (Attachment): 必須 (Required)
- 日時 (Date/Time): 2024年09月20日 15:20
- イベント (Event): 必須 (Required)

The event options grid includes:

- 食事 (Meal)
- 口腔ケア (Oral Care)
- 入浴 (Bathing)
- 体位交換 (Position Change)
- 更衣 (Changing Clothes)
- 整容 (Grooming)
- 排泄大 (Large Excretion)
- 排泄小 (Small Excretion)
- 事故 (Accident)
- ヒヤリハット (Near Miss)
- 巡視 (Patrol)
- レクリエーション (Recreation)
- リハビリ (Rehabilitation)
- 医命 (Medical Attention)
- 外出 (Going Out)

At the bottom of the modal, there are "キャンセル" (Cancel) and "保存" (Save) buttons.

07. バーチャルアシスタント機能のスマホ対応

ブラウザ版のみでご利用できていた、バーチャルアシスタント(チャットbot)についてAndroid・iOSアプリの画面上部にロボアイコンが追加され、アプリ版でも利用できるようになりました。



08. 質疑応答

新機能のおさらい

01. 居室一覧画面に「直近24時間」のデータ表示機能を追加
02. 空室の居室詳細画面へのアクセスを可能にする対応
03. ベッド活動アラート設定に、AI分析によるおすすめ設定時間表示を追加
04. 居室詳細画面に現在の時刻でイベントを登録できるボタンを追加
05. アラート通知設定画面の改善
06. アラート音声を入居者名で読み上げる機能の追加
07. バーチャルアシスタント機能のスマホ対応
08. 質疑応答



質問がある方はお気軽にどうぞ！

00. 機能要望ヒアリング

マイナーバージョンアップ件数（不具合対応除く）

- SaaS型のメリットを活かし、お客さまの声（ニーズ）を新機能として随時拡充
- 前年と同様のペースでバージョンアップを実施

2023年11月～2024年7月 41件／3Q累計
(2023年10月期 41件／年)

こんな機能がほしい！をお聞かせください。

00. お助けメニュー:新機能ガイド

The screenshot shows the EcoNavista+Dr. dashboard with a grid of room status cards. A red box highlights the 'お助けメニュー' (Help Menu) button in the top left corner of the interface.

The screenshot shows the 'お助けメニュー' (Help Menu) dropdown menu. A red box highlights the '新機能ガイド' (New Feature Guide) option.

The screenshot shows the 'お助けメニュー > 新機能ガイド' (Help Menu > New Feature Guide) page. A red box highlights the 'バックナンバーや新機能紹介動画の確認はこちら' (Click here to check back numbers or new feature introduction videos) option.

アップデート情報

－ ライフリズムナビに関するアップデート情報はこちら－

「バーチャルアシスタント機能」のスマホ対応他アップデート内容 (2024/10/17実施)

■ アップデート情報

- ◆ ライフリズムナビ+Dr.メンテナンス時 2024年10月17日 (木) 9時30分～11時30分 【アップデート内容】 バーチャルアシスタント機能のスマホ対応空室の居室詳細画面へのアクセスを可能にする対応 居室一覧画面に「滞在24時間」のデータ表示機能を追加...

続きを見る >

「要注意者ピックアップAI機能」を追加 他アップデート内容 (2024/8/27実施)

■ アップデート情報

- ◆ ライフリズムナビ+Dr.メンテナンス時 2024年8月27日 (火) 9時30分～11時30分 【アップデート内容】 要注意者ピックアップAI機能カメラの閲覧制限機能 ダッシュボード機能アップデート (アラート統計データ/アラートが吸込になるまでの時間を追加) ア...

続きを見る >

本日はご清聴ありがとうございました。

開発・運営: エコナビスタ株式会社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟10階
TEL:050-5526-3869